



NOTIFICACIÓN IMPORTANTE

KCI ha tenido conocimiento de que en casos muy infrecuentes la unidad de terapia ACTIV.A.C.™ puede apagarse sin notificarlo al usuario (p. ej., sin ninguna alarma ni advertencia), por lo que la terapia de presión negativa para el tratamiento de heridas queda interrumpida. En escasas ocasiones, el apagado accidental podría ocasionar lesiones, entre otras, maceración reversible, infección localizada o deterioro de la herida.

Observe con atención tanto la unidad como el apósito para asegurarse de que la unidad esté **ACTIVADA** y de que se está administrando la terapia. Al administrar la terapia, la unidad de terapia ACTIV.A.C.™ emite un sonido intermitente y el apósito empezará a comprimirse.

Consulte la documentación que se suministra con la unidad de terapia ACTIV.A.C.™ para obtener más información sobre cómo encender la unidad e iniciar la terapia.

Si se produce esta situación, póngase en contacto con un profesional sanitario o con **KCI en el teléfono +44 20 3027 8717** o visite **<https://www.acelity.com/contact-us>**.

Datos de contacto del representante en España:

Izasa Hospital S.L.U.

Teléfono: **900 100 835**

email: **service@izasahospital.com**