

La AEMPS informa del posible riesgo de desprendimiento del acoplamiento de liberación rápida de determinadas grúas de techo Molift Air

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2022
Categoría: productos sanitarios
Referencia: PS, 31/2022

- **La AEMPS informa del riesgo de que en determinadas grúas de techo Molift Air fabricadas por Etac A/S, el acoplamiento de liberación rápida Molift pueda desprenderse y provocar la caída del paciente**
- **La Agencia establece una serie de recomendaciones de cómo actuar para distribuidores, ortopedias, profesionales sanitarios y cuidadores**

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través del fabricante ETAC A/S, Dinamarca, del posible desprendimiento del acoplamiento de liberación rápida Molift utilizado en determinados modelos de grúas de techo Molift Air durante la movilización de pacientes. El acoplamiento de liberación rápida es el dispositivo giratorio del elevador que conecta la correa de elevación a la barra de la eslinga.

De acuerdo a la información proporcionada por el fabricante, el acoplamiento de liberación rápida Molift podría desprenderse debido a que no se montó correctamente durante el proceso de fabricación, y provocar la caída del paciente.

La empresa va a proceder a la sustitución del acoplamiento de liberación rápida a través de un técnico certificado de Molift.

Situación actual en España

La empresa está enviando una [nota de aviso](#) dirigida a distribuidores y ortopedias, así como para profesionales sanitarios/cuidadores que puedan disponer de los productos afectados, para informales del problema detectado y de las acciones a seguir.

Productos afectados en España

Acoplamientos de liberación rápida fabricados entre el 2 de marzo de 2020 y el 17 de marzo de 2022, montados en las siguientes grúas de techo Molift Air:

Modelo de Grúa	Número de artículo de grúa	Número de serie de grúa	Número de artículo del acoplamiento de liberación rápida
Molift Air 200	M26200	426067	2510363
Molift Air 200	M26200	426075	
Molift Air 200	M26200	426076	
Molift Air 200	M26200	426077	
Molift Air 200	M26200	426081	
Molift Air 200	M26200	426082	
Molift Air 200	M26200	440116	
Molift Air 200	M26200	440135	
Molift Air 200	M26200	447088	
Molift Air 205	M25205	416650	2510077
Molift Air 205	M25205	416653	
Molift Air 205	M25205	431915	
Molift Air 205 IRC	M27205	447412	

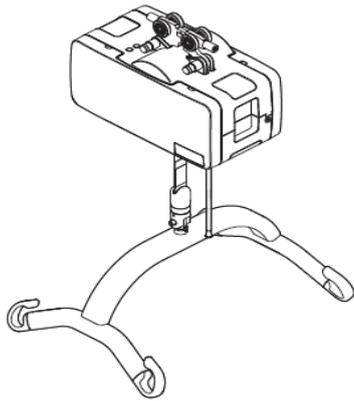


Figura 1: Grúa de techo Molift Air

Figura 2: Acoplamiento de liberación rápida



Información para distribuidores y ortopedias

- No venda ni entregue las grúas afectadas hasta que se haya realizado la sustitución del acoplamiento de liberación rápida.
- Si ha vendido o entregado a pacientes o centros sanitarios grúas de techo Molift Air, del modelo y números de serie indicados en la [nota de aviso](#), identifique y contacte con ellos para que el servicio técnico certificado de Molift realice la sustitución del acoplamiento de liberación rápida Molift.
- Siga las recomendaciones indicadas en la nota de aviso para la solicitud de los nuevos kits de acoplamiento y su sustitución por un técnico certificado de Molift.
- Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de estos productos, notifíquelo a través del portal de notificación [NotificaPS](#).



Información para profesionales sanitarios/cuidadores

- Antes de utilizar la grúa, compruebe que no haya hueco en el juego de acoplamiento de liberación rápida. Si se observa una separación claramente visible, retire la grúa del uso y llame a su distribuidor u ortopedia.
- Contacte con su proveedor de la grúa para que gestione la petición de kits de acoplamiento nuevos y su sustitución por un técnico certificado de Molift.
- Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de estos productos, notifíquelo a través del portal de notificación [NotificaPS](#).

Datos de la empresa distribuidora

Karinter 94 S.L.

Tel. 932 211 917

Correo electrónico: info@karinter.com