
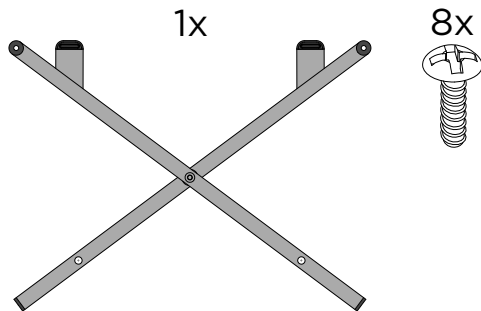



Instrucciones de montaje de Dolomite® Gloss®

i Tiempo aproximado para completar la sustitución de la barra transversal | quince minutos (15')

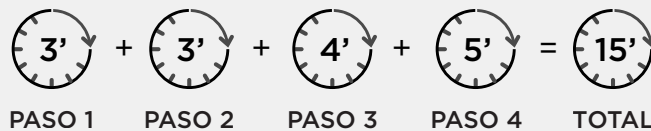


i Este documento proporciona instrucciones para reemplazar la **barra transversal original** con una versión rediseñada recientemente, lo que es necesario para solventar los problemas de resistencia y rendimiento de este producto.

i Es **importante** que compruebe la integridad general del asiento. Antes de iniciar este procedimiento, realice una evaluación exhaustiva del estado actual del producto (consulte la "Lista de verificación de inspección" del Manual de servicio del producto).

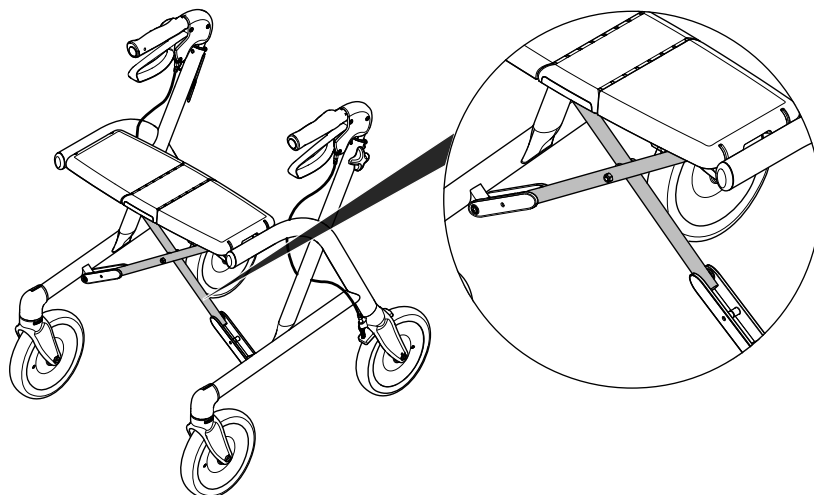

1. Desmontaje del asiento del rollator*

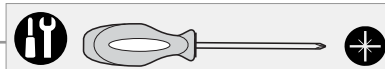


- Afloje y retire los **ocho tornillos** (2x**A**, 2x**B**, 2x**C** y 2x**D**) y los cuatro soportes que sujetan el asiento al chasis del rollator.
- Separe el asiento del rollator.



i *De forma alternativa al Paso 1., puede quitar los **cuatro tornillos internos** (1x**A**, 1x**B**, 1x**C** y 1x**D**) y solo aflojar los tornillos externos, de modo que pueda girar los soportes 90 grados hacia afuera y separar el asiento del chasis del rollator.

Si usa esta alternativa, puede mantener los cuatro soportes sujetos al asiento, lo que facilita volver a colocar el asiento en el chasis después de montar la nueva barra transversal.

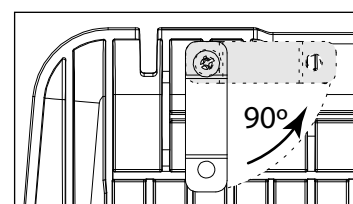




Invacare Rea AB
Växjövägen 303
SE-343 71 Diö
Sweden

Dolomite



2. Desmontaje de la barra transversal del chasis


i Los dos conectores de plástico **A** no deben separarse del marco al desmontar la barra transversal.

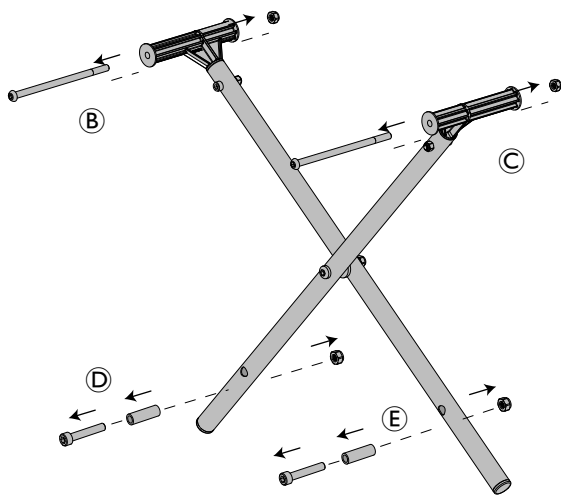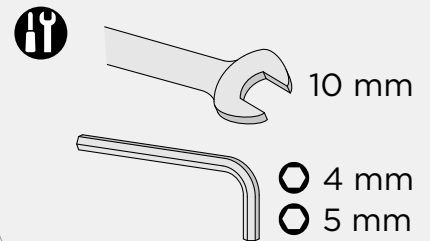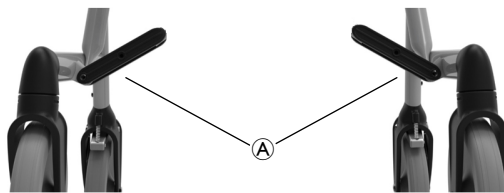

- Afloje los conectores (tuercas y pernos) superiores izquierdos **B** y derechos **C** entre la barra transversal y el chasis del rollator.
- Afloje los conectores (tuercas, espaciadores y pernos) inferiores izquierdos **D** y derechos **E** entre la barra transversal y el chasis del rollator.
- Retire y deseche la barra transversal original.

3. Montaje de la nueva barra transversal


Realice el Paso 2. en orden inverso.

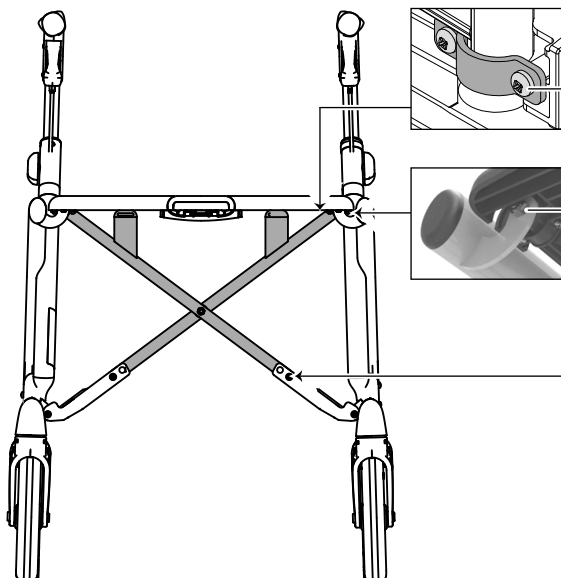

Par de torsión
3 ± 0.5 Nm

Par de torsión
3 ± 0.5 Nm


Par de torsión
3 ± 0.5 Nm

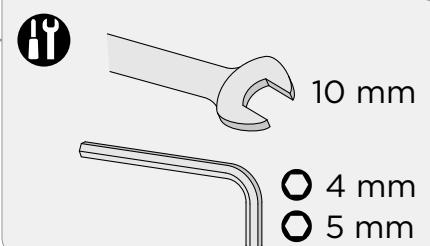

i **NO** olvide utilizar los espaciadores al fijar los conectores inferiores **D** y **E** entre el chasis y la barra transversal.

4. Vuelva a colocar el asiento en el rollator

Realice el Paso 1. en orden inverso y consulte el Paso 3. para obtener información sobre el par de torsión.

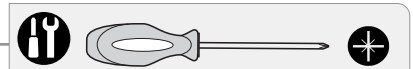

i En caso de que los tornillos originales se dañen o se pierdan, utilice los tornillos proporcionados con la nueva barra transversal para volver a colocar el asiento.



Invacare Rea AB
Växjövägen 303
SE-343 71 Diö
Sweden

Dolomite



Yes, you can!