
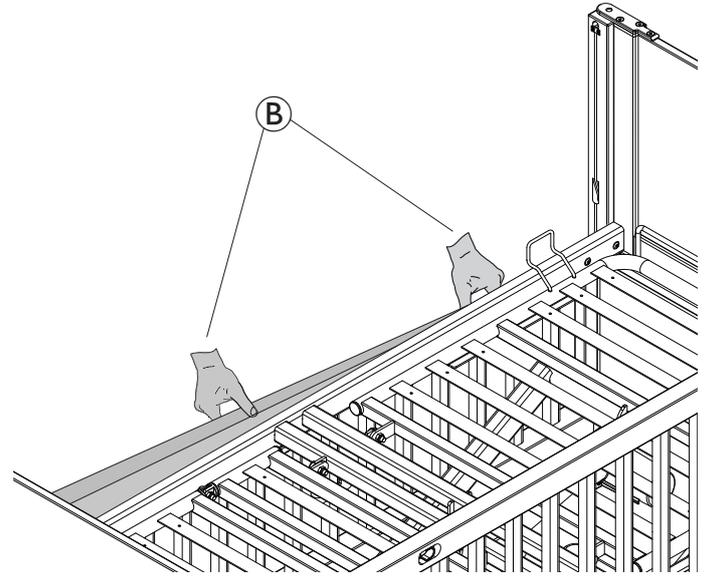


Bajar la barandilla lateral

Desmontaje

1. Elevar la cama hasta su posición superior.
2. Bajar la barandilla lateral hasta su posición inferior.
3. Presione y mantenga los dos pestillos uno hacia el otro y baje la barandilla lateral hasta que el tope del émbolo toque la plataforma del colchón.

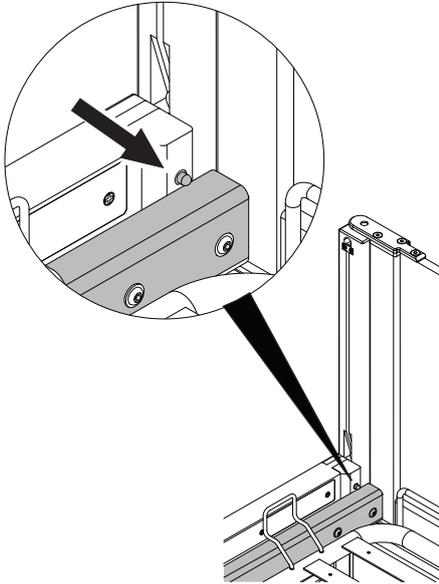

5. Siga los pasos 1 y 2 de la sección de montaje, en orden inverso, para desmontar los ejes de ambos extremos de la cama.

4. Sujete la barandilla lateral con una mano y presione el tope del émbolo de uno de los lados con la otra mano (A) para extraer la barandilla lateral (como se muestra en B).

