


ADENDA

Gracias por elegir las muletas Thuasne **Globe-Trotter** (W2016) o **Globe-Trotter+** (W2017).

IMPORTANTE: Lea atentamente este apéndice y las instrucciones de uso antes de usar este producto y guárdelos para futuras consultas.

ADVERTENCIA: Contrariamente a la información proporcionada en las instrucciones de uso, el peso máximo del usuario de las muletas **Globe-Trotter** y **Globe-Trotter+** es de 130 kg.

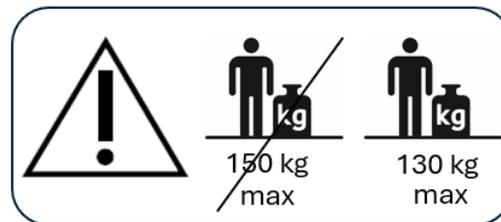

El profesional de la salud ajustará el dispositivo y supervisará su primer uso. Las muletas se ajustan de acuerdo con la altura del usuario; **Nunca los preste a otro usuario sin la validación de un profesional de la salud.**

Este dispositivo ayuda a las personas con movilidad reducida temporal o permanente a mantener su libertad de movimiento proporcionándoles un punto de apoyo adicional. **No lo use para ningún otro uso.**

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

La falta de mantenimiento y cuidado de sus muletas podría resultar en **lesiones graves.**

La integridad de las muletas depende de las condiciones de uso, almacenamiento y cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y cuidado. **Es imperativo respetar** la información proporcionada en las instrucciones de uso.

Compruebe siempre la integridad del dispositivo antes de cada uso. No utilice el dispositivo si está dañado. Póngase en contacto con un distribuidor especializado o un profesional sanitario en **caso de daños.**

www.thuasne.com

www.thuasne.com/global-contact



©Thuasne – ref – (yyyy-mm)

+ Añade los pictogramas de clasificación:



pero con el símbolo

Feuille 3



avec ou sans imprim vert à valider avec les achats