



Ref.: 006/Diciembre 2009

ALERTA DE PRODUCTOS SANITARIOS

NOTA DE SEGURIDAD

ADAPTADORES PARA CONECTAR LAS BÁSCULAS LIKO 200, 350 Y 400, A LAS GRÚAS LIKO VIKING XL/L/M/S/XS, LIKOLIGHT Y UNO

POSIBLE FALLO DEL ADAPTADOR DE LAS BÁSCULAS LIKO CON LA CONSECUENTE CAÍDA DEL PACIENTE.

ASUNTO

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ha sido informada por la empresa Liko AB, Suecia, fabricante de los productos, sobre la posibilidad de fallo de los adaptadores usados para conectar las Básculas Liko 200, 350 y 400 a las grúas Liko.

Los adaptadores afectados son:

- Adaptador Golvo, número de producto 2006010
- Adaptador 12 mm, número de producto 2016501, 2016503 y 2016504
- Adaptador 8 mm, número de producto 2016502

El adaptador puede bloquearse cuando los usuarios retuercen la percha de una determinada manera. Cuando el paciente es elevado en esta posición, esta pieza puede romperse provocando la caída del paciente.

Estos productos han sido distribuidos en España por la empresa Cambridge Equipamiento S.L.

SITUACIÓN ACTUAL

En febrero de 2009, Liko llevó a cabo una acción correctiva a través del envío de una Nota de Seguridad a sus clientes. En esta nota se informaba del posible fallo del adaptador que podía resultar en la caída del paciente. La empresa recomendaba al usuario examinar el adaptador para comprobar si estaba dañado (fisura, doblez), y, en este caso, dejar de utilizar la grúa hasta que no se retire de la misma el adaptador y la báscula Liko.



Ejemplo de un adaptador sin daños.
Apto para su uso según las instrucciones de Liko.



Adaptador
doblado o con
fisuras



Ejemplo de un adaptador dañado.
Ponga la grúa fuera de servicio hasta que se hayan retirado
el adaptador y la báscula LikoScale de la misma.
Por favor, póngase en contacto con su representante
local de Liko para reemplazar el adaptador.

Asimismo, Liko instó al usuario a seguir las siguientes instrucciones de seguridad:

Antes de realizar la elevación, asegúrese siempre de que:

- *Los accesorios de elevación no estén dañados*
- *El accesorio de elevación esté conectado de forma correcta y segura al paciente, para evitar el riesgo de lesiones personales*
- *El accesorio de elevación esté bien conectado al sistema de elevación.*
- *Los sistemas de elevación estén correctamente conectados a la grúa, y de que cuelguen verticalmente y se pueden mover con libertad*



Mientras el adaptador cuelgue verticalmente y se pueda mover con libertad, la grúa puede usarse sin ningún riesgo.



La percha está enredada en una posición bloqueada. No siga subiendo al paciente, compruebe si el adaptador está dañado.



La percha está enredada en una posición bloqueada. No siga subiendo al paciente, retire el adaptador.

Debe quitar siempre el adaptador de la báscula si quita la báscula LikoScale.


Posteriormente, el fabricante ha desarrollado una pieza estándar que consiste en una funda que cuando se coloca en el adaptador de la báscula de Liko, evita de forma efectiva un uso incorrecto.

Liko AB ha enviado una segunda Nota de seguridad a sus distribuidores en junio de 2009, junto con las fundas que deben colocarse en todas las básculas de Liko y las instrucciones para su montaje.

RECOMENDACIONES GENERALES

Si usted dispone de una grúa liko viking xl/l/m/s/xs, likolight o uno, con un adaptador para conectar la báscula liko 200, 350 o 400 a la grúa, y que haya sido distribuido por Cambridge Equipamiento S.L., compruebe si el adaptador está dañado, y si este fuera el caso, deje de utilizar la grúa hasta que no se retire de la misma el adaptador y la báscula Liko. Asimismo, deberá de seguir las instrucciones antes mencionadas, antes de realizar una elevación.

Por otro lado, una vez reciban las fundas, deberán de colocarlas en todas las básculas de Liko que tuvieran, de acuerdo con las instrucciones de montaje. Si no hubieran recibido las fundas o las instrucciones de montaje, póngase en contacto con el distribuidor Cambridge Equipamiento S.L.

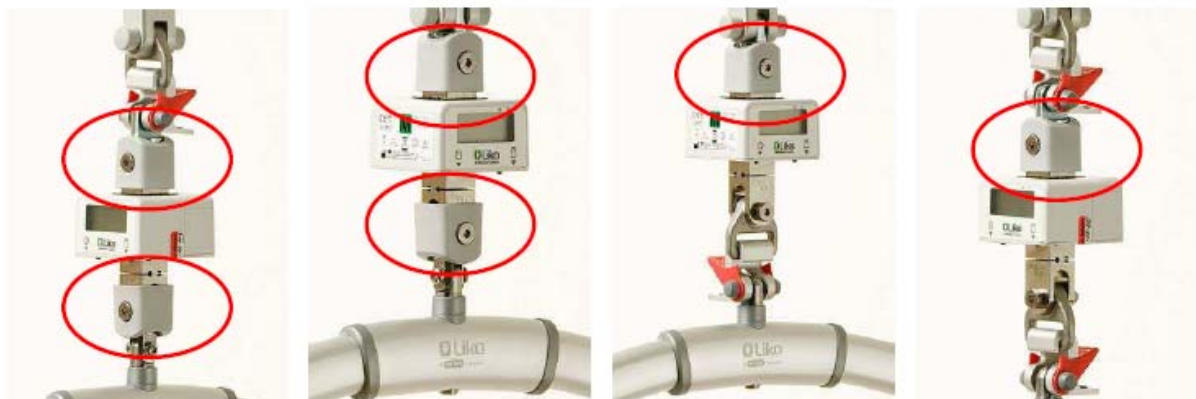

OK

Las imágenes anteriores muestran cuatro formas posibles de montar la funda, dependiendo de cómo esté montada la Báscula de Liko. En las instrucciones de montaje dispone de instrucciones más detalladas.

DATOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA

Cambridge Equipamiento S.L.
Polígono Industrial Multiva Baja Travesía A nº 5,
31192 Multiva Baja, Navarra
Teléfono: 948 248455
Fax: 948 152433
www.cambridgeequipamiento.com

Madrid, 14 de Diciembre de 2009