



**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
AEMPS**

**RIESGO DE QUE LOS USUARIOS DE
DETERMINADOS ELEVADORES Y GRÚAS
DOMICILIARIAS, FABRICADOS POR BHM MEDICAL
INC., CANADÁ, RECIBAN UNA DESCARGA
ELÉCTRICA.**

Fecha de publicación 7 de febrero de 2011

Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS. SEGURIDAD
Referencia: PS /04 /2011

La AEMPS informa del riesgo de que los usuarios de los elevadores y grúas domiciliarias, fabricados por BHM Medical Inc., Canadá, entre mayo de 2004 y marzo de 2006, reciban una descarga eléctrica debido al fallo prematuro del cable de conexión que posee aislante sencillo.

ASUNTO

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ha sido informada por las Autoridades Sanitarias del Reino Unido, del riesgo de que los usuarios de los elevadores y grúas domiciliarias, fabricados por BHM Medical Inc., Canadá, entre mayo de 2004 y marzo de 2006, reciban una descarga eléctrica debido al fallo prematuro del cable de conexión que posee aislante sencillo.

Estos productos se distribuyen en España a través de la empresa Establecimientos Ortopédicos PRIM S.A., sita en la calle Conde Peñalver nº 24, 28006 Madrid.



La Tabla 1 muestra los modelos de elevadores y grúas afectados:

Tabla 1: Modelos de elevadores y grúas afectados

Part name	Part number
CRICKET 3	83301003, 83301005, 83301007.20
CYPRESS-2	81501003, 81521003, 81541005
ERGOLIFT	86000003, 86000008
ERGOLIFT 600	86100005
ERGOSTAND	86400008
EXPLORER	86000005.14
EXPLORER 600	86100005.14
GRADUATE	82501004, 82501005.09, 82601003, 82601004, 82601008
JUNIOR	82001044, 82001045, 82001045.09, 82001047.20, 82101043, 82101044, 82101048, 82121043, 82121045, 82141045
MEDILIFTER-IV	87000003
MEZZO	87001003.01
MINISTAND	86500004, 86500005, 86500007.20, 86501003, 86501003.01, 86501004, 86501007.20, 86601003, 86601004, 86601008
ML-4	87001008
PRIMO	87000003.01
SHERPA	83301005.14
SSL-2	84001003, 84001008
STANDUP	86500005.09, 86500035.09, 86501005.09, 86501035.09
TREKKER	86400005.14
XTREME	87001005.09

De acuerdo con la información facilitada por la empresa, durante el ensamblado de algunos de los productos mencionados se instaló un cable de conexión que posee aislante sencillo en lugar de un cable con aislante doble, lo que incrementa el riesgo de fallo prematuro.

Si el cable de alimentación está dañado el usuario podría sufrir una descarga eléctrica si conecta la grúa a una toma de corriente, debido a la conexión entre la estructura de metal de la grúa y la alimentación principal.

SITUACIÓN ACTUAL

La empresa envió una nota de aviso que lleva fecha de 14 de abril de 2010, para informar del problema detectado a los usuarios que disponen del producto afectado y poder proceder a la sustitución de los cables incorrectos. Asimismo, comunicó a la AEMPS que en España se habían distribuido 58 grúas afectadas por este problema. No obstante, de acuerdo



con la información disponible actualmente, sólo se ha podido localizar y reparar un número limitado de dichas grúas.

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta la información disponible, y que todavía existen en el mercado Español algunos equipos cuyos cables de conexión poseen el aislante sencillo que no han podido ser localizados por el distribuidor, la AEMPS recomienda a los **usuarios** de los elevadores o grúas domiciliarias, fabricados por BHM Medical Inc., Canadá:

1. Comprobar si el modelo de su elevador o grúa se corresponde con alguno de los citados en la Tabla 1 de esta Nota.
2. En caso de que así sea, comprobar si el número de serie de su elevador o grúa se corresponde con alguno de los citados en el Anexo a esta Nota.
3. Si el modelo y el número de serie de su elevador o grúa, coinciden, deje de utilizar el equipo y contacte a la mayor brevedad con la empresa Establecimientos Ortopédicos PRIM S.A, para que lleve a cabo la sustitución del cable de conexión.
4. Si su elevador o grúa no se corresponde con los modelos y números de serie citados en la Tabla 1 y en el Anexo respectivamente, no le afecta esta nota de seguridad.

DATOS DE LA EMPRESA

Establecimientos Ortopédicos PRIM S.A.
C/ Conde Peñalver nº 24
28006 Madrid.
Tel.: 91 728 04 40
Fax 91 729 17 30



ANEXO 1: NÚMEROS DE SERIE AFECTADOS EN ESPAÑA

Nº DE SERIE	Nº DE SERIE	Nº DE SERIE	Nº DE SERIE
815-0147	833-0495	833-0535	833-426
833-0471	833-0473	833-0536	833-427
833-0472	833-0474	833-0475	833-0477
815-0148	833-0496	833-0476	833-0478
821-0654	833-0512	833-0537	833-428
821-0655	833-0513	821-0273	833-429
833-0486	833-0515	821-0274	833-430
833-0487	833-0516	821-0275	833-431
833-0488	826-0661	815-0133	833-432
833-0489	833-0468	815-0134	833-433
833-0490	833-0469	815-0135	815-0139
833-0491	833-0470	821-0522	815-0140
833-0492	815-0144	821-0524	815-0141
833-0493	815-0145	833-425	821-0628
833-0494			821-0629