



Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios AEMPS

ADAPTACIÓN DE LAS ESLINGAS “STANDARD SLINGBAR 450” DE LAS GRÚAS MÓVILES Y AÉREAS LIKO

Fecha de publicación 24 de julio de 2013

Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS, SEGURIDAD.
Referencia: PS, 10 /2013

La AEMPS informa de que la empresa Liko AB, Suecia, ha desarrollado una cubierta de seguridad para su adaptación en las eslingas “Standard SlingBar 450” de las grúas móviles y aéreas Liko, para evitar que se produzcan lesiones graves al tropezarse con ellas.

ASUNTO

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ha sido informada por las Autoridades Competentes de Suecia de que la empresa Liko AB, Suecia, ha desarrollado una cubierta de seguridad para su adaptación en las eslingas “Standard SlingBar 450™” de las grúas móviles y aéreas Liko, para evitar que se produzcan lesiones graves al tropezarse con ellas.

De acuerdo con la información facilitada por la empresa, se ha detectado un problema de seguridad por el que el paciente, personal hospitalario o personas que se encuentren cerca, podrían resultar lesionados gravemente si se tropiezan o se caen sobre la barra de la eslinga, por lo general, cuando la grúa está estacionada o almacenada porque no se encuentra en uso.

Liko ha desarrollado una cubierta de seguridad para la barra de la eslinga a fin de reducir estos riesgos.


IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS AFECTADOS:

Eslingas “Standard SlingBar 450™” con los siguientes números de producto: 20090029, 20190024, 20190041, 31190015, 31290017, 31290043, 3156001, 3156003, 3153007, 3156007, 3156014, 3156016, 31590043 y 5019013, distribuidos entre enero de 1980 y noviembre de 2012.

Las eslingas “Standard SlingBar 450™” con los números de producto indicados anteriormente se pueden utilizar con las grúas Liko modelos:

- Golvo de las series 1000, 3000 y 7000
- Viking M, Viking L
- LikoLight 100 y 125
- Caroli 101
- Uno 100, 101 y 102.

Diseño de la barra de la eslinga afectada:

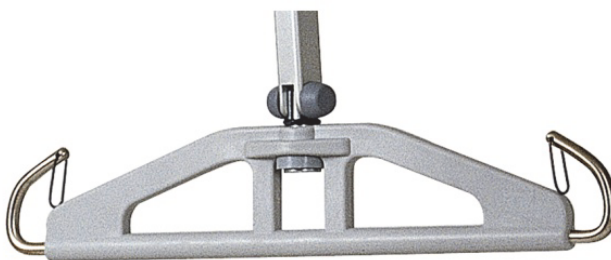


Diseño de la barra de la eslinga universal que NO se encuentra afectada:



SITUACIÓN ACTUAL

La empresa ha enviado la nota de aviso a las empresas distribuidoras y ortopedias a las que ha suministrado el producto afectado en nuestro país, en la que se informa del problema detectado y en la que se incluyen las acciones a seguir para solicitar las cubiertas de seguridad y adaptarlas a la barra de la eslinga.

Cubierta de seguridad desarrollada por Liko:

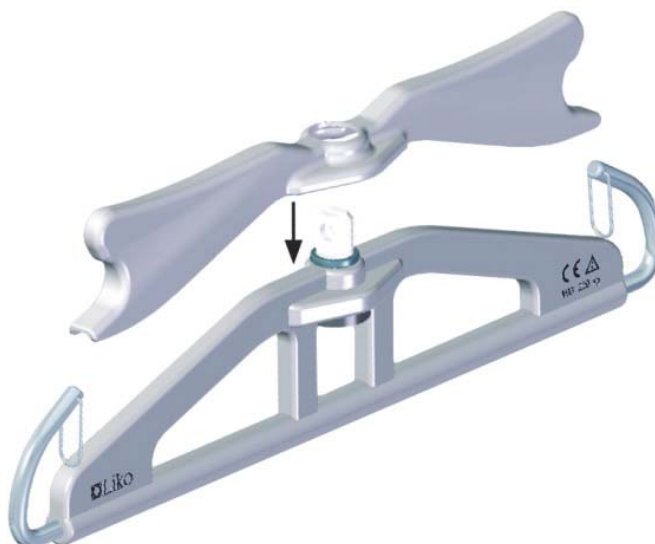

RECOMENDACIONES

Empresas distribuidoras y ortopedias:

Si ha vendido o ha entregado eslingas “Standard SlingBar 450™” a pacientes y centros sanitarios intente identificarlos, solicite las cubiertas de seguridad al fabricante o a la empresa que les suministró el producto y facilíteselas a sus clientes.

Pacientes y centros sanitarios

Si usted dispone de alguna de las grúas anteriormente mencionadas:

1. Compruebe si la barra de la eslinga se corresponde con el diseño del producto afectado y en dicho caso contacte con la ortopedia en la que haya adquirido el producto o con la empresa que se lo suministró para que le facilite la cubierta de seguridad.
2. En el caso de no poder contactar con la empresa que le proporcionó el producto, contacte con el servicio técnico de Hill-Rom Ibérica S.L., en el teléfono 902193423.



DATOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA

Hill-Rom Ibérica S.L.,
C/ Comerç nº 1-22, Nave 14, Pol. Ind. El Pla
08980 San Feliu de Llobregat (Barcelona).
Tlfn: 902193423

Anteriormente:
Cambridge Equipamiento, S.L.
Pol. Ind. Mutilva Baja Travesía A Nº 5,
31192 Mutilva Baja (Navarra)
Tlfn: 948248455.