

## Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios AEMPS

### MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE LOS ELEVADORES PARA PISCINAS OXFORD DIPPER

Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2017

Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS, SEGURIDAD  
Referencia: PS, 20/2017

***La AEMPS informa de la necesidad de realizar la prueba de carga en las inspecciones semestrales y de reemplazar los elevadores para piscinas Oxford Dipper, modelos OP10013 y OP10014 fabricados por Joerns Healthcare Ltd. Reino Unido, con más de 7 años de antigüedad.***

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través de la empresa Sunrise Medical, S.L., de nueva información sobre la vida útil de los elevadores para piscinas Oxford Dipper, modelos OP10013 y OP10014, fabricados por Joerns Healthcare Ltd. Reino Unido, debido al deterioro y corrosión del elevador durante su uso.

De acuerdo con la información facilitada por la empresa, como resultado de las pruebas efectuadas y los problemas de corrosión no necesariamente visibles desde el exterior que pueden aparecer en estos productos debido a las condiciones de humedad por su ubicación junto a piscinas, ha revisado la declaración de vida útil máxima esperada para estos elevadores de piscina, estableciéndola en 7 años, por lo que las unidades que se identifique que tienen más de 7 años de antigüedad deben reemplazarse.

Asimismo, para garantizar la detección de cualquier deterioro que podría comprometer la seguridad de los usuarios, además de llevar a cabo y realizar las comprobaciones diarias, los procedimientos de limpieza y las inspecciones semestrales detalladas en el manual, se recuerda que en todas las inspecciones semestrales debe efectuarse la prueba de carga.

Este producto se distribuye en España a través de la empresa Sunrise Medical S.L. Polígono Baikola, 41, 48498 Arrankudiaga, Vizcaya.

## SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA

La empresa ha remitido una Nota de Aviso para informar del problema detectado a los distribuidores y ortopedias que han suministrado el producto afectado en nuestro país, en la que se incluye las recomendaciones y actuaciones a seguir para el correcto mantenimiento del elevador.

## PRODUCTOS AFECTADOS

Elevadores para piscinas Oxford Dipper, modelos OP10013 y OP10014 fabricados por Joerns Healthcare Ltd. Reino Unido.



Oxford Dipper (Nº pza. OP10013)




Oxford Dipper (Nº pza. OP10014)


Localización de la etiqueta que incluye la fecha de fabricación del elevador



Ubicación de etiqueta

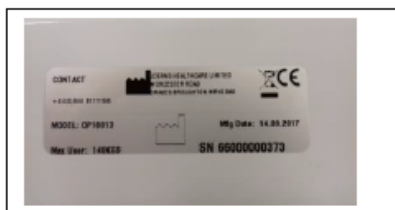

Ejemplo etiqueta OP10013

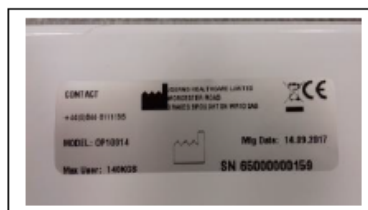

Ejemplo etiqueta OP10014

## RECOMENDACIONES

### a) Ortopedias

Si ha vendido o ha entregado elevadores para piscina Oxford Dipper de los modelos afectados, intente identificar a los usuarios para informarles que en la revisión semestral deberá efectuarse una prueba de carga y que los elevadores con más de siete años de antigüedad deberán reemplazarse.



## **b) Usuarios**

1. Si dispone de algún elevador para piscina Oxford Dipper, compruebe si la etiqueta se corresponde con los modelos indicados en el apartado de “Productos afectados”. En caso de que así sea contacte con la ortopedia o con la empresa que se lo suministró para que le realicen las inspecciones semestrales, le informen de la vida útil de su elevador y de cuando tiene que ser reemplazado, teniendo en cuenta que los elevadores con más de 7 años deben reemplazarse.
2. En el caso de no poder contactar con la ortopedia que le proporcionó el producto, contacte con la empresa distribuidora Sunrise Medical S.L.
3. Si su elevador no es un elevador para piscina Oxford Dipper de los modelos mencionados en el apartado “Productos afectados”, no le afecta esta nota informativa.

## **DATOS DEL DISTRIBUIDOR**

Sunrise Medical S.L.

Polígono Baikola, 41,

48498 Arrankudiaga,

Vizcaya.

Tel. 902 14 24 34