



Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios AEMPS

REEMPLAZO DE LOS BASTIDORES DE DETERMINADAS GRÚAS MÓVILES DE PACIENTE MINSTREL

Fecha de publicación: 4 de febrero de 2019

Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS, SEGURIDAD
Referencia: PS, 05/2019

La AEMPS informa del posible riesgo de desprendimiento del bastidor de determinadas grúas móviles Minstrel sin báscula, fabricadas por ArjoHuntleigh AB, Suecia, lo que puede ocasionar la caída del paciente.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través de la empresa ArjoHuntleigh AB, Suecia, del riesgo de desprendimiento del bastidor de determinadas grúas móviles Minstrel sin báscula, modelo HMA0001, fabricadas entre enero de 2008 y marzo de 2010, lo que puede ocasionar la caída del paciente.

La empresa va a proceder al reemplazo de los bastidores de estas grúas por una nueva pieza revisada.

SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA

La empresa ha remitido una Nota de Aviso para informar del problema detectado a los distribuidores y establecimientos sanitarios que disponen de los productos afectados en nuestro país, en la que se incluye las recomendaciones y acciones a seguir.

PRODUCTOS AFECTADOS

Grúas móviles Minstrel SIN báscula, modelo HMA0001, con números de serie afectados del MPLAT0801A3116 al MN1003G256, fabricadas entre enero de 2008 y marzo de 2010.

Este producto se distribuye en España a través de la empresa ARJO IBERIA S.L., C/ Alguer 7, Nave 4, 08130 Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona.



Localización de Etiqueta
identificativa

Ver números de serie afectados en el Anexo 1.

RECOMENDACIONES

Distribuidores y ortopedias

Si ha vendido o ha entregado a pacientes o centros sanitarios grúas móviles Minstrel sin báscula, del modelo y números de serie indicados en el Anexo 1, intente identificarlos para que el servicio técnico de Arjo reemplace el bastidor de la grúa.

Pacientes y Centros Sanitarios

Si dispone de grúas móviles Minstrel sin báscula, compruebe si la etiqueta de la grúa se corresponde con alguno de los números de serie indicados en el Anexo 1, o bien verifique el modelo de bastidor de su grúa usando como referencia las siguientes imágenes.



Si el bastidor de la grúa es el de la imagen 1, deje de utilizarla y contacte con el servicio técnico de Arjo para el reemplazo de la pieza.

Si el bastidor de su grúa se corresponde con la imagen de la figura 2, no le afecta esta nota informativa.

Si tiene alguna duda sobre si su báscula está o no afectada, contacte con ARJO IBERIA S.L., en el teléfono 931 315 999 o por correo electrónico info.es@arjo.com

DATOS DE LA EMPRESA

ARJO IBERIA S.L.

C/ Alguer 7, Nave 4.

08130 Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona

Teléfono: +34 931 315 999

info.es@arjo.com



ANEXO I

NÚMEROS DE SERIE DE LAS GRÚAS MÓVILES MINSTREL SIN BÁSCULA, MODELO HMA0001, FABRICADAS POR ARJOHUNTLEIGH AB, SUECIA, ENTRE ENERO DE 2008 Y MARZO DE 2010

Modelo de equipo	Número de serie	Modelo de equipo	Número de serie
HMA0001	MPLAT0801A3137	HMA0001	MPLAT0809A3392
HMA0001	MPLAT0801A3142	HMA0001	MPLAT0810A3471
HMA0001	MPLAT0801A3143	HMA0001	MPLAT0810A3472
HMA0001	MPLAT0801A3152	HMA0001	MPLAT0810A3473
HMA0001	MPLAT0802A3160	HMA0001	MPLAT0904A3696
HMA0001	MPLAT0803A3220	HMA0001	MPLAT0904A3697
HMA0001	MPLAT0803A3222	HMA0001	MPLAT0905A3749
HMA0001	MPLAT0803A3223	HMA0001	MPLAT0905A3750
HMA0001	MPLAT0803A3224	HMA0001	MPLAT0905A3751
HMA0001	MPLAT0804A3248	HMA0001	MPLAT0905A3752
HMA0001	MPLAT0805A3266	HMA0001	MPLAT0905A3753
HMA0001	MPLAT0805A3270	HMA0001	MPLAT0905A3754
HMA0001	MPLAT0805A3271	HMA0001	MPLAT0905A3755
HMA0001	MPLAT0805A3272	HMA0001	MPLAT0905A3756
HMA0001	MPLAT0806A3284	HMA0001	MPLAT0906A3767
HMA0001	MPLAT0806A3287	HMA0001	MPLAT0906A3790
HMA0001	MPLAT0806A3288	HMA0001	MPLAT0910A3920
HMA0001	MPLAT0806A3289	HMA0001	MPLAT0910A3936
HMA0001	MPLAT0807A3309	HMA0001	MPLAT0910A3937
HMA0001	MPLAT0807A3310	HMA0001	MPLAT0910A3938
HMA0001	MPLAT0807A3311	HMA0001	MPLAT0910A3939
HMA0001	MPLAT0807A3312	HMA0001	MPLAT0910A3940
HMA0001	MPLAT0807A3313	HMA0001	MPLAT0910A3941
HMA0001	MPLAT0807A3314	HMA0001	MPLAT0910A3942
HMA0001	MPLAT0807A3318	HMA0001	MPLAT0910A3951
HMA0001	MPLAT0807A3319	HMA0001	MPLAT0910A3956
HMA0001	MPLAT0809A3379	HMA0001	MN1001E215
HMA0001	MPLAT0809A3380	HMA0001	MN1001E222
HMA0001	MPLAT0809A3381	HMA0001	MN1003E250
HMA0001	MPLAT0809A3382	HMA0001	MN1003E251
HMA0001	MPLAT0809A3383	HMA0001	MN1003E252
HMA0001	MPLAT0809A3384	HMA0001	MN1003E253