





Febrero de 2021

Estimado paciente:

El adaptador para línea móvil 4G LATITUDE MIMIC que recibió fue diseñado para permitir que su comunicador LATITUDE envíe la información de su dispositivo implantado a la consulta de su médico. Boston Scientific ha determinado que su adaptador para línea móvil tiene un problema que impide que el comunicador pueda enviar esta información a su médico según lo previsto. Las figuras 1 y 2 muestran imágenes de este adaptador para línea móvil y la etiqueta presente en la caja en que se envió.

Si el comunicador muestra una onda de envío amarilla significa que no se puede conectar con la consulta de su médico (consulte la figura 3). Hay varias razones por las que es posible que su comunicador no pueda conectarse. Si su médico le ha dicho que esto se debe a un problema con el adaptador para línea móvil, su médico le enviará un adaptador para línea móvil de repuesto lo antes posible. Tenga en cuenta que los datos de su dispositivo implantado están seguros y protegidos.

Si el comunicador LATITUDE detecta un problema grave con el dispositivo implantado, el comunicador mostrará un icono rojo Llamar al médico (consulte la figura 4). Si se muestra este icono, es importante que llame a su médico de inmediato.

 <p>Figura 1. Imágenes de la parte de delante y de detrás del adaptador para línea móvil 4G LATITUDE MIMIC.</p>	 <p>Figura 2. Etiqueta del paquete del adaptador para línea móvil 4G LATITUDE MIMIC.</p>
 <p>Figura 3. Si su comunicador no se conecta correctamente al consultorio de su médico, el comunicador mostrará una onda de envío amarilla.</p>	
 <p>Figura 4. Si hay un problema con su dispositivo implantado, el comunicador mostrará un icono rojo Llamar al médico.</p>	

¿Qué debería hacer?

- Deseche (tire) el adaptador para línea móvil que tiene ahora.
- Mantenga y asista a todas sus citas médicas y revisiones del dispositivo programadas.
- Llame inmediatamente a su médico si:
 - su dispositivo implantado emite pitidos, lo que significa que el dispositivo debe comprobarse lo antes posible; o
 - el comunicador LATITUDE muestra un icono rojo Llamar al médico (consulte la figura 4 anterior).

En Boston Scientific, la seguridad de nuestros pacientes es nuestra prioridad y nuestro enfoque constante. Nos comprometemos a trabajar de cerca con usted y con su médico para tratar este problema relacionado con el adaptador para línea móvil. Le recomendamos que comente esta carta con su médico, que sabe mejor de qué modo puede afectarle esta información.



Alexandra Naughton
Vicepresidenta de Control de calidad



Kenneth Stein, MD, FACC, FHRS
Vicepresidente sénior de Control de Calidad y Oficial
Médico Jefe, RM